

Spray Congelante - Medical Freeze Spray

DESCRIPCIÓN

Medical Freeze Spray™ de Max-Pro es un spray congelante que se utiliza para congelar algodón o pellets en Endodoncia para testear respuesta normal y vitalidad de los dientes, estimulando las terminaciones nerviosas de la pulpa. Aerosol inodoro, incluye una cánula para la aplicación direccionada.

APLICACIÓN

Endodoncia, Hospitales, Laboratorios, Laboratorios de Histología, cortes Criostáticos, entre otros.

VENTAJAS

- Congela hasta -60°C
- No daña la capa de ozono (No CFC/HCFC)
- No deja residuos
- Inoloro
- Válvula/Gatillo cómodo

INSTRUCCIONES DE USO

1. Inserte la cánula en la válvula
2. Retire el seguro de fábrica ubicado sobre la válvula (pieza plástica de 5x7mm)
3. No es necesario agitar
4. Aprete el gatillo en ráfagas cortas y consistentes



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

1) Peso Neto	283.5 g
2) Tamaño Individual	6.35 x 6.35 x 21.6 cm
3) Peso Individual	394.6 g
4) Unidades por caja	12 latas
5) Peso de la caja	4.73 Kg
6) Vida útil almacenado	4 - 5 años

PRESENTACIONES

Disponible en formato Aerosol 10 oz / 283,5 g.

ALMACENAMIENTO

Todos los envases deben ser almacenados en áreas cubiertas. Los productos no deben almacenarse o ser expuestos a temperaturas superiores a los 50°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas

ADVERTENCIAS DE USO

Contenido bajo presión. No perforar, no incinerar, ni rellenar este envase. No exponer a temperaturas mayores a 50°C o 120°F. Mantener alejado de los niños y mascotas. Para más información de salud, seguridad y medio ambiente consulte la hoja de datos de seguridad del producto (MSDS ó Material Safety Data Sheet). Betagas SpA no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.